

# 環境清拭用 **ルビスタ<sup>®</sup>** **ワイプ** (100枚入)の使用方法


## 準備する物



## 使用用途

よく手が触れる環境表面※1、  
医療機器※2、器具・器材の除菌洗浄に

- ※1.ドアノブ、机、家具、ベッド周囲、スイッチ類、トイレの便器、便座、水洗レバー、洗面所の蛇口、床、手すり等
  - ※2.機器内部に調製液が染み込まないようにご注意ください
- ※ルビスタ ワイプはトイレに流せません

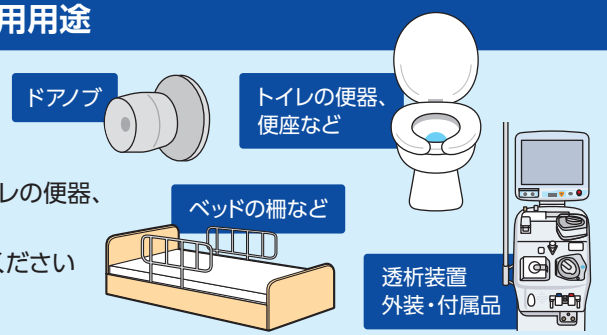


## 溶液の調製(準備)



## ワイプの作製(準備)



## 環境表面の清拭(使用)

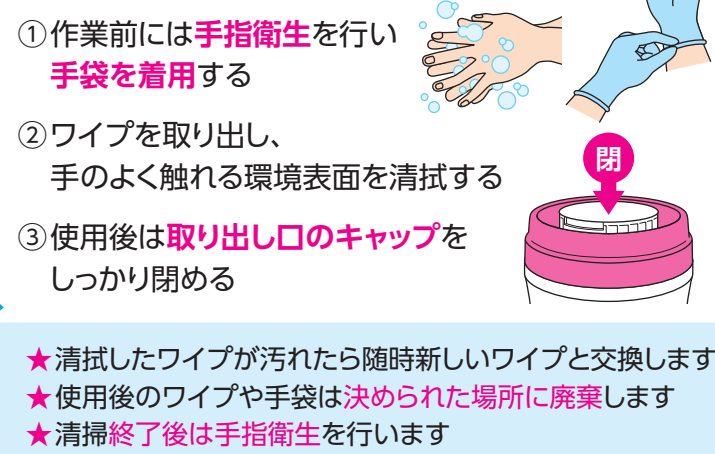

## ルビスタ ワイプの管理(使用后)

- ◎ 作製したワイプの**使用期限は溶液の調製から7日間**です  
※調製日シールを用いて使用期限の管理をしてください
- ◎ 使用期限の過ぎたワイプは**廃棄し、新たに作製**します  
※一度、容器内を水で軽くすすいでから作製してください
- ◎ 続けて使用しない用具は**水洗い**し、乾燥させ保管します

- ★ルビスタクリアを**完全に溶かして**から使用します ※溶解には**2分程度**かかります
- ★すぐにワイプの作製を行わない場合は**付属キャップ**を閉めて保管します
- ★ワイプロールに調製液を注ぐ際は**飛び散らない様**に**ゆっくりと注ぎ**ます